



Útmutató a HPV önmintavételhez

Előkészítés

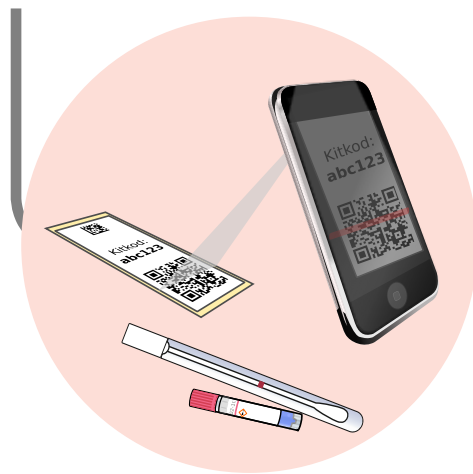


Olvassa be a címkén található QR-kódot **mobilkamerájával** vagy QR-alkalmazásával, és kövesse a QR-link utasításait.

Tudj meg többet: selfsampling.hu/faqs

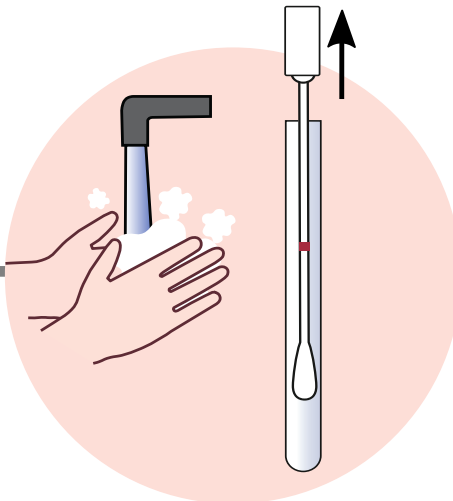


A teszt elvégzése előtt alaposan mosson kezet. Nyissa ki a csövet a tesztpálcával. Tartsa a kupakot, amikor kiveszi a tesztpálcát a csőből.


Mintavétel

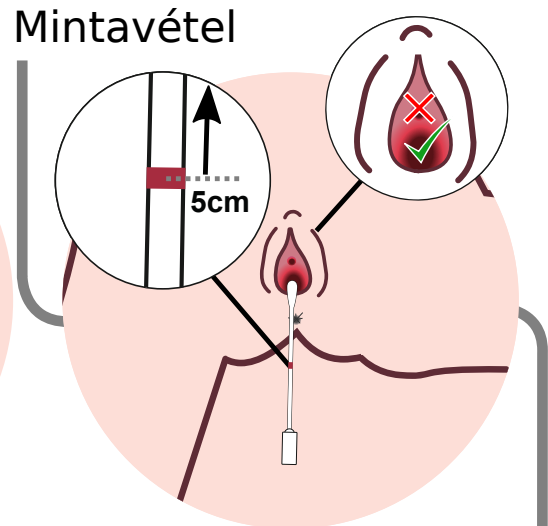


A tesztpálcán egy piros jelzés található, amely 5 centimétert mutat. Vigye fel a tesztpálcát a hüvelybe a piros jelzésig. A pálcát nem szabad a hügycsőbe bedugni!

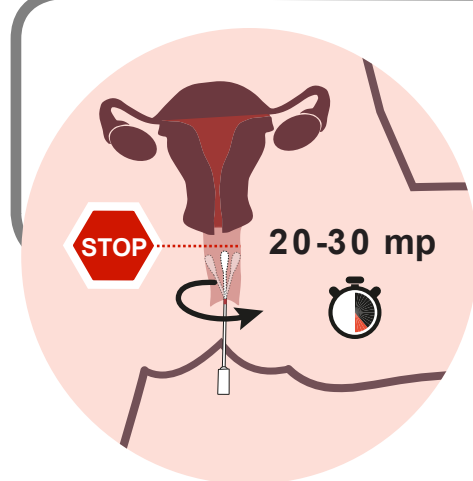

A pálcát nem szabad a méhnyakig felvinni. Forgassa a botot a hüvely falához körülbelül 20-30 másodpercig.

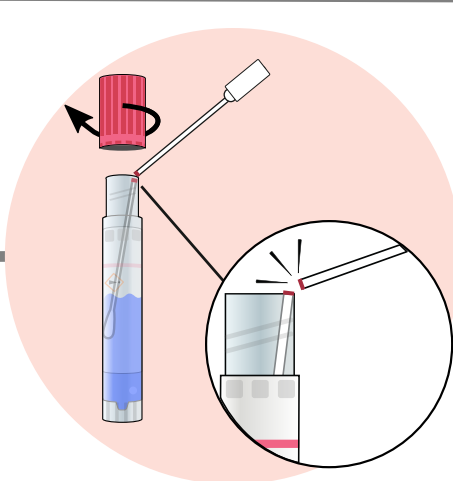


Óvatosan nyissa ki a mintavevő csövet, hogy a folyadék ne folyjon ki. Engedje le a tesztpálcát, és törje le a jelnél.

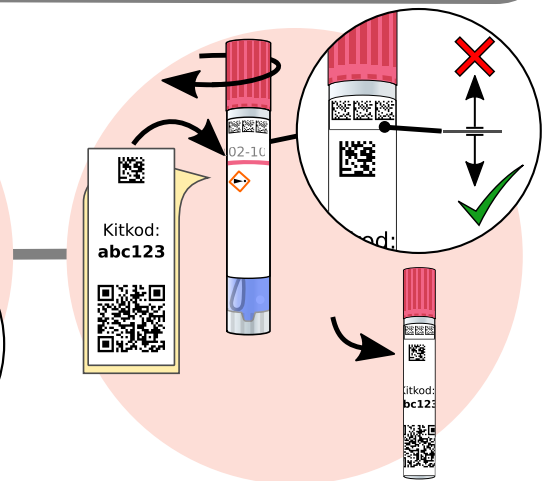

Zárja le a mintavevő csövet a kupak felcsavarásával. Helyezze el a QR-kódot tartalmazó matricát a kis pontozott négyzetek alá.

Beküldés

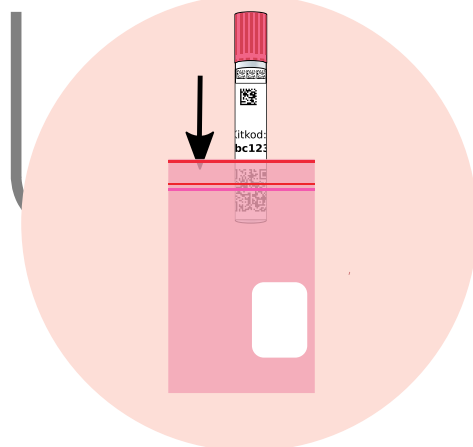


Helyezze a mintavevő csövet a nedvszívó papírral ellátott műanyag higiéniai zacskóba. Zárj le a zacskót. Helyezze a zacskót a felbélyegzett válaszborítékba.

Ellenőrző lista

- ☐ Beolvastam a QR-kódot, és összekapcsoltam a **személyazonosságommal**.
- ☐ A csőre ragasztottam a QR-kóddal ellátott címkét.
- ☐ A minta a higiéniai táskában van.
- ☐ Odaadtam a mintát az orvosnak.

A teszt akkor is elvégezhető, ha menstruál és/vagy váladékozik. Ha a QR-kód nem működik, regisztrálja manuálisan a kódot: selfsampling.hu/myprofile

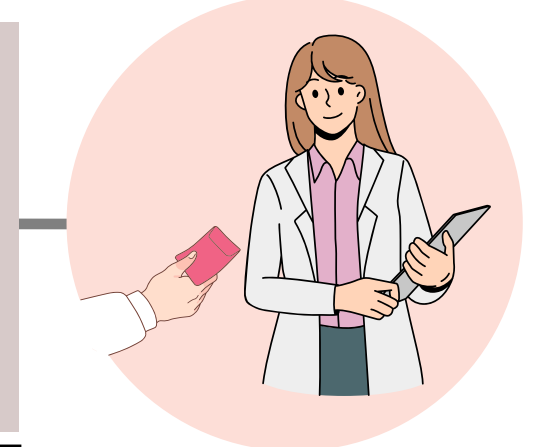

Kérjük, adja át a táskában lévő mintát az orvosnak. Eredményét látni fogja a weboldalon (saját profilom): selfsampling.hu/myprofile